

WIEDERVERWENDBARE ELEKTRODEN

50 x 100 mm

E-CM50100- MT

Zur Anwendung bei nur einer Patientin

Nur zur Verwendung mit MamaTENS

Gebrauchsanweisung

ANWENDUNG UND ENTFERNUNG DER PADS

1. Entnehmen Sie die Pads aus der Verpackung. Entflechten und verbinden Sie die Anschlusskabel.
2. Stellen Sie sicher, dass der MamaTENS ausgeschaltet ist, und stecken Sie dann die Stecker der beiden Anschlusskabel in das Gerät.
3. Legen Sie fest, wo die Elektrodenpads platziert werden sollen. Dies ist entweder an den gemäß Bedienungsanleitung vorgegebenen Stellen oder nach Anweisung Ihrer Hebamme oder Ihres Arztes.
4. Reinigen Sie an den vorgesehenen Stellen die Haut und trocknen Sie sie gründlich ab.
5. Entnehmen Sie eine Elektrode aus ihrer Schutzhülle. Ziehen Sie dazu die Schutzhülle von der Ecke ausgehend ab. Ziehen Sie NICHT am Anschlusskabel, da dies sonst beschädigt werden kann oder ausfällt. Legen Sie das Pad auf die Haut, indem Sie zunächst die Mitte des Pads auflegen und dann die Ränder glattstreichen. Gehen Sie bei den anderen drei Pads ebenso vor. Heben Sie die Schutzhüllen auf, um die Pads nach der Verwendung darin aufbewahren zu können und folglich Beschädigungen zu vermeiden.
6. Stellen Sie sicher, dass die Anschlusskabel aller vier Pads während der Verwendung weder gespannt sind noch gezogen werden. Ansonsten könnten Pads nicht funktionieren bzw. ausfallen.
7. Nach der Verwendung: Stellen Sie sicher, dass der MamaTENS abgeschaltet ist, bevor Sie die Pads von der Haut nehmen. Nehmen Sie die Pads von der Haut, indem Sie sie von der Ecke ausgehend ablösen. Ziehen Sie NICHT am Anschlusskabel. Legen Sie Pads bei Nichtverwendung zurück in die Schutzhüllen und bewahren Sie sie in der geschlossenen Verpackung auf.
8. Entsorgen Sie die Pads und geben Sie nur das Gerät zurück.

WICHTIG

1. Die Pads sind zur Anwendung bei nur einer Patientin bestimmt.
2. Die Pads nicht auf verletzter Haut oder auf Hautstellen ohne normale Empfindsamkeit anwenden.

ACHTUNG

Bei Hautirritationen die Verwendung unterbrechen und eine Hebamme, einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal hinzuziehen.



E-CM50100-MTNEW

ANORDNUNG DER PADS

Die Pads müssen oberhalb der Nervenverbindungen angebracht werden, die die Gebärmutter und den Geburtskanal mit dem Rückenmark verbinden. Die richtige Anordnung der Pads bietet maximale Schmerzlinderung; schauen Sie sich bitte daher die Bilder genau an und befolgen Sie diese Anweisungen:



1. Die Pads vorsichtig von der Schutzfolie abziehen. Nicht an den Anschlusskabeln ziehen.
2. Das obere Padpaar (angeschlossen an CH1) ungefähr 5 cm voneinander entfernt auf beiden Seiten der Wirbelsäule und ungefähr 7,5 cm unterhalb der Schulterblätter (nahe den Wirbeln T10, T11, T12 und L1) anbringen. Das ist knapp unterhalb der BH-Linie.
3. Das untere Padpaar (angeschlossen an CH2) ungefähr 10 cm voneinander entfernt auf beiden Seiten der Wirbelsäule und ungefähr 2,5 cm oberhalb der Grübchen am Wirbelsäulenansatz, knapp oberhalb des Gesäßes (nahe den Wirbeln S2, S3 und S4), anbringen.



WIEDERVERWENDBARE ELEKTRODEN

50 x 100 mm

E-CM50100- MTNEW

Zur Anwendung bei nur einer Patientin

Nur zur Verwendung mit MamaTENS

Gebrauchsanweisung

ANWENDUNG UND ENTFERNUNG DER PADS

9. Entnehmen Sie die Pads aus der Verpackung. Entflechten und verbinden Sie die Anschlusskabel.
10. Stellen Sie sicher, dass der MamaTENS ausgeschaltet ist, und stecken Sie dann die Stecker der beiden Anschlusskabel in das Gerät.
11. Legen Sie fest, wo die Elektrodenpads platziert werden sollen. Dies ist entweder an den gemäß Bedienungsanleitung vorgegebenen Stellen oder nach Anweisung Ihrer Hebamme oder Ihres Arztes.
12. Reinigen Sie an den vorgesehenen Stellen die Haut und trocknen Sie sie gründlich ab.
13. Entnehmen Sie eine Elektrode aus ihrer Schutzhülle. Ziehen Sie dazu die Schutzhülle von der Ecke ausgehend ab. Ziehen Sie NICHT am Anschlusskabel, da dies sonst beschädigt werden kann oder ausfällt. Legen Sie das Pad auf die Haut, indem Sie zunächst die Mitte des Pads auflegen und dann die Ränder glattstreichen. Gehen Sie bei den anderen drei Pads ebenso vor. Heben Sie die Schutzhüllen auf, um die Pads nach der Verwendung darin aufbewahren zu können und folglich Beschädigungen zu vermeiden.
14. Stellen Sie sicher, dass die Anschlusskabel aller vier Pads während der Verwendung weder gespannt sind noch gezogen werden. Ansonsten könnten Pads nicht funktionieren bzw. ausfallen.
15. Nach der Verwendung: Stellen Sie sicher, dass der MamaTENS abgeschaltet ist, bevor Sie die Pads von der Haut nehmen. Nehmen Sie die Pads von der Haut, indem Sie sie von der Ecke ausgehend ablösen. Ziehen Sie NICHT am Anschlusskabel. Legen Sie Pads bei Nichtverwendung zurück in die Schutzhüllen und bewahren Sie sie in der geschlossenen Verpackung auf.
16. Entsorgen Sie die Pads und geben Sie nur das Gerät zurück.

WICHTIG

3. Die Pads sind zur Anwendung bei nur einer Patientin bestimmt.
4. Die Pads nicht auf verletzter Haut oder auf Hautstellen ohne normale Empfindsamkeit anwenden.

ACHTUNG

Bei Hautirritationen die Verwendung unterbrechen und eine Hebamme, einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal hinzuziehen.



E-CM50100-MTNEW

ANORDNUNG DER PADS

Die Pads müssen oberhalb der Nervenverbindungen angebracht werden, die die Gebärmutter und den Geburtskanal mit dem Rückenmark verbinden. Die richtige Anordnung der Pads bietet maximale Schmerzlinderung; schauen Sie sich bitte daher die Bilder genau an und befolgen Sie diese Anweisungen:



4. Die Pads vorsichtig von der Schutzfolie abziehen. Nicht an den Anschlusskabeln ziehen.
5. Das obere Padpaar (angeschlossen an CH1) ungefähr 5 cm voneinander entfernt auf beiden Seiten der Wirbelsäule und ungefähr 7,5 cm unterhalb der Schulterblätter (nahe den Wirbeln T10, T11, T12 und L1) anbringen. Das ist knapp unterhalb der BH-Linie.
6. Das untere Padpaar (angeschlossen an CH2) ungefähr 10 cm voneinander entfernt auf beiden Seiten der Wirbelsäule und ungefähr 2,5 cm oberhalb der Grübchen am Wirbelsäulenansatz, knapp oberhalb des Gesäßes (nahe den Wirbeln S2, S3 und S4), anbringen.

