

i glove

Le gant est pour l'usage d'un patient unique.

Il est fourni avec 1 câble et un paquet de 2 électrodes réutilisables autoadhésives.

Vérifiez que l'unité TENS est éteinte.

Branchez l'adaptateur *stud* au gant et insérez l'un des connecteurs à broches dans l'adaptateur, et l'autre dans le connecteur de l'électrode.

Le gant doit être porté légèrement humide afin d'améliorer la circulation du courant.

Appliquer le gant.

Placer l'électrode sur la surface extérieure au même endroit (à côté) du gant.



PainAway House
9 Blenheim Road
Longmead Business Park
Epsom, Surrey
KT19 9BE
Tel : +44 (0)13 7272 3434
Fax : +44(0)13 7274 5434

www.tenscare.co.uk